


充電方法

USBケーブルを製品本体の充電ポートに差し込み充電します。

充電残量インジケータについて

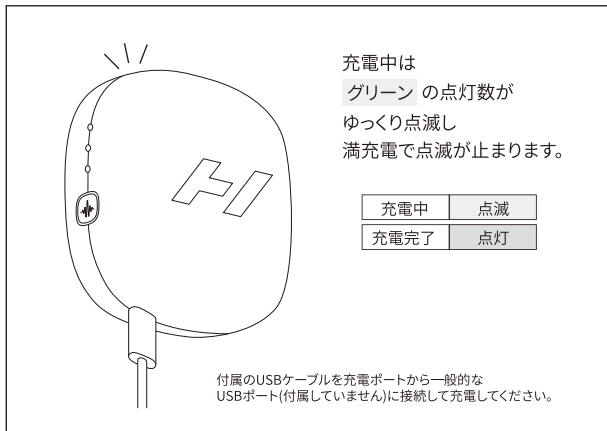

- ※充電の際はVenom GoポッドをVenom Goパッドから外して下さい。
- ※バッテリー寿命を長くさせるには充電が完全になくなる前に再充電することを推奨します。
- ※レベル3の熱で約35分の連続使用が可能ですが、温熱レベル/振動パターンにより時間が異なります。(1回のセッションは、通常はタイマー機能により10分、アプリと連携した場合は最長30分で自動停止されますが、必要に応じて再スタートしていただけます。)
- ※1時間以上の連続使用はお控えください。
- ※1時間以上の使用時は本体を30分以上休ませてください。
- ※使用されない期間が続く場合にも毎月1回程度、定期的に充電されることを推奨します。
- ※不在時や一晩中の充電はしないでください。
- ※必ず付属のVenom Go専用のUSBケーブルで充電してください。
- ※バッテリーの取り外しはできません。

Bluetooth®接続方法

Hyperice App と製品を接続して専門家の監修したルーチン動画を見ながら、製品を楽しむことができます。また、日々のアクティビティデータを組み合わせて、あなたの体のニーズに合った推奨プログラムを作成することもできます。

Android



iOS



接続の前に

- ・右のQRコードよりアプリをダウンロードしてください。
- ・Hypericeの電源がオンになっているかご確認ください。
- ・携帯端末のBluetooth®がオンになっているかご確認ください。
- ・Hypericeが携帯端末の近くにあるかを確認してください。

アプリの登録

Hypericeアプリのをひらき、ウィンドウの指示に沿ってアカウント作成、プロフィール作成、製品登録を進めます。

- ・Create an account: メールアドレス、パスワード登録します。
- ・Build your profile: 氏名を登録します。・About you: 誕生日、性別、身長、体重を登録します。
- ・Select hte devices you already own: お手持ちの製品を登録します。
- ・Select your frequent activities: よく行うスポーツや行動を登録します。
- ・Get custom recommendations: 日々のアクティビティデータを記録するアプリサービスとの連携が可能です。

アプリの使い方

- ・Home画面に、登録した製品が表示されているので、製品をタップします。
- ・Remote画面の製品を選択します。Bluetooth®接続画面になります。
- ・ご使用製品の電源と携帯端末のBluetooth®がオンになっていれば自動で接続されます。お使いの製品が表示されたら製品をタップしContinueを選択してください。アプリ内でセッション可能な画面になります。
- ・自分の好みのセッションに選択してお楽しみ頂けます。


- 以下の機能がアプリ内で操作可能になります。
- ・温熱レベルの操作(3段階)
- ・振動パターンの操作(3パターン)
- ・タイマーの操作(1回の可動時間を3分~30分まで1分単位で選択できます。)
- ・セッションの開始/停止

※アプリの提供言語は、英語版のみです。日本語版リリースにはしばらくお待ちください。
※アプリは予告なくアップデートされることがあり、登録方法、使い方が更新されることがあります。

保証書


本書はお買上げ日から上記の期間中に故障が発生した場合、アフターサービスに記載の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。

持込修理

品番	24000-284-00	お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	ご住所 干				
	電話番号() -				
	お名前				様
販売店				JAN	

- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、修理等の本製品に関わる業務においてのみ利用させていただきます。また、修理業務のために製造メーカーに提供する場合があります。
- 保証書と購入証明書(レシート・納品書)がない場合は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 材料及び製造技術の欠陥以外の原因、取扱上の不注意、改造、不正修理等によって発生した不良におかれましては保証期間内であっても保証の対象とはなりません。
- 日本正規品以外(並行輸入品・模造品)は保証・不具合のサポート対象外となります。
- 修理・故障の際は、お買上げの販売店にご相談ください。修理は持込修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。■操作方法・組立方法・その他のお問合せはお買上げの販売店又はお客様ご相談センターにご相談ください。
- 消耗品は保証期間内であっても有償となります。詳しくはお客様ご相談センターへご相談ください。

長年ご愛用の製品の点検を



愛着点検

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱い
- 本体に変形がある、または異常に熱くなる
- コードに傷がある、またはコードを動かすと通電したりしなかったりする
- 使用中に異常な音がる
- 本体や部品にひび割れがある

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はお客様ご相談センターに点検をご相談ください。

【地球の環境保護の為、廃棄する時はそのまま放置せず、各自治体の取り決めに従ってください】

お客様ご相談センター
0120-980-997

受付時間：10:00～12:00
13:00～16:00
月～金曜日
(祝日・年末年始・夏季休業を除く)

発売元:株式会社ツインズ
〒273-0853 千葉県船橋市金杉7-1-9ツインヒルズ西館3F
TEL:047-449-8380 FAX:047-449-8381 URL <http://www.twins-corp.com/>

Venom Go

使い方マニュアル

製品を安全にお使いいただくために、
使い方マニュアルと別紙の取扱説明書を必ずお読みいただき、
使い方マニュアルは大切に保管ください。

保証書付

Ver:1.0


各部の名称と機能

仕様


- 1 Venom Goポッド
- 2 Venom Goパッド
- 3 パッドライナー
- 4 接続マグネット

Venom Goポッドの仕様


- A 充電残量インジケータ
- B Bluetooth® インジケータ
- C 電源ボタン (ON/OFF)
- D 温熱レベルインジケータ
- E 温熱レベルボタン
- F 振動パターンインジケータ
- G 振動パターンボタン
- H 充電ポート

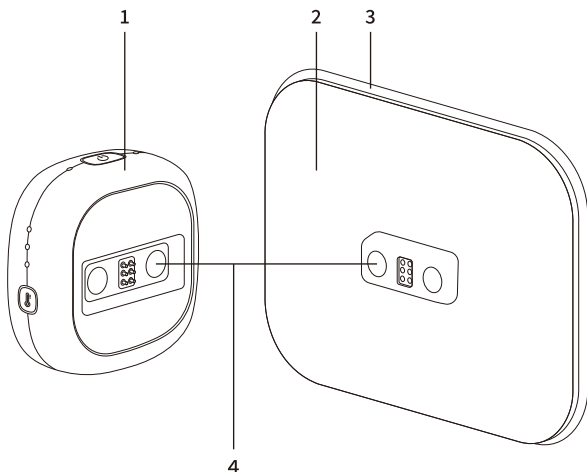

Venom Goポッド

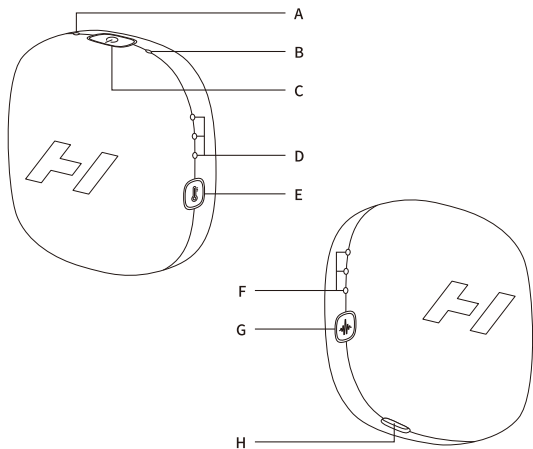

付属品

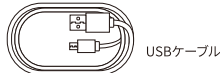

USBケーブル



Venom Goパッド×3

※USB充電器は付属していません。



ご使用前に
ご確認ください

器具が当たっている箇所の皮膚をチェックし、不快な兆候が見られた場合、直ちに離し、電源を切ってください。
万一皮膚に異常を感じた場合は医師の診察を受けてください。

ご使用方法

▲ ご使用前にご確認ください

- 接続方法
- 製品の装着
- 電源の入/切




- 充電後は必ず、USBケーブルを抜いてください。
- 充電中は電源が入りません。




清潔で乾いた肌にお使いください。

本器具は濡れた肌、あるいは外用軟膏、クリーム、スプレー等（特に発熱成分を含むもの）の上では使用しないでください。やけどする恐れがあります。

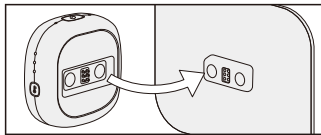


本体を接続する

Venom Go ポッドの凹とパッドの凸を接続マグネット で接続します。
※パッドが接続されるまで製品は作動しません。

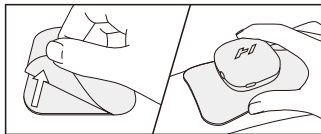


製品を装着する

パッドからパッドライナーを剥がし、使用したい箇所の肌に貼り付けます。
(パッドライナーを廃棄しないでください。使用後はパッドをパッドライナーに貼り直し、涼しく乾燥した場所に保管してください。)

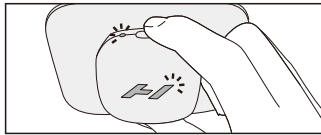

電源を入れる

電源ボタンを約1秒間押し続けると電源がオンになります。
(電源がオンになると、充電残量インジケータやVenom Goポッドの中央のロゴが点灯します。)

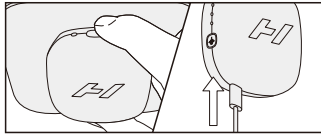

電源を切る

電源ボタンを約1秒間押し続けると、電源がオフになります。
以下の場合でも電源が自動的にオフになります。
■本体が充電されている場合
■一定時間続けて使用された場合
(通常約10分で自動停止されますが、アプリ連携により可動時間は3~30分に変更が可能です。)


ご使用方法

▲ ご使用前にご確認ください

Venom Goポッドの
操作




- 動作を始めるにはポッドにパッドを接続する必要があります。
- パッドから外れると動作が自動的に停止されます。

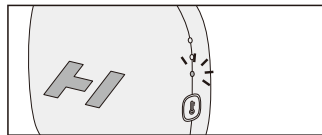

温熱レベルを調節する


温熱レベルボタン押すと3段階の温熱レベルに変更ができます。
温熱レベルに応じて温熱レベルインジケータが点灯していきます。
4度目に温熱が停止します。

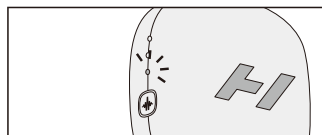

振動パターンを調節する

振動パターンボタンを押すと3種の振動パターンに変更ができます。
振動パターンに応じて振動パターンインジケータが点灯していきます。
4度目に振動が停止します。

お手入れ方法

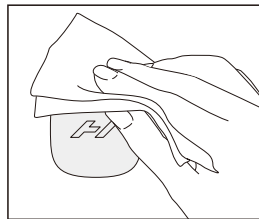

▲ お手入れの前にご確認ください

- 電源は必ずオフの状態で行ってください。
- 充電中に行わないでください。

少し湿らせた綺麗な布でポッドやパッド(必要な場合)をやさしく拭きます。
使用後のVenom Goパッドはパッドライナーに貼り直し、直射日光の当たらない、涼しくて乾燥した場所に保管してください。

Venom Goパッドは肌につかなくなったら、廃棄してください。追加のパッドは <https://hypericejp.com/> などで購入することができます。