

Vyper Go

使い方マニュアル



製品を安全にお使いいただくために、
 使い方マニュアルと別紙の取扱説明書を必ずお読みいただき、
 使い方マニュアルと取扱説明書は大切に保管ください。


保証書付

Ver:1.0

各部の名称と機能

仕様


- 1 速度レベルインジケータ
- 2 電源/速度設定ボタン
- 3 充電ポート
- 4 充電残量インジケータ
- 5 Bluetooth接続インジケータ

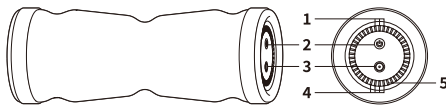

充電方法


充電器のプラグを製品本体の充電ポートに差し込み充電します。

充電残量インジケータについて

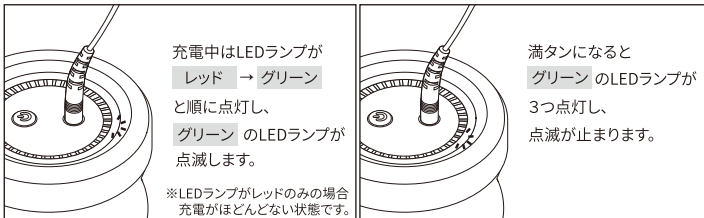

- ※バッテリー寿命を長くさせるには充電が完全になくなる前(グリーン)のLEDランプが1つのみ点灯)に再充電することを推奨します。
- ※1時間以上の連続使用はお控えください。
- ※1時間以上の使用時は本体を30分以上休ませてください。
- ※使用されない期間が続く場合は毎月1回程度、定期的に充電されることを推奨します。
- ※不在時や一晩中の充電はしないでください。
- ※必ず付属のVyper Go専用の充電器で充電してください。本体の故障や火災の原因となります。
- ※バッテリーの取り外しはできません。

ご使用方法

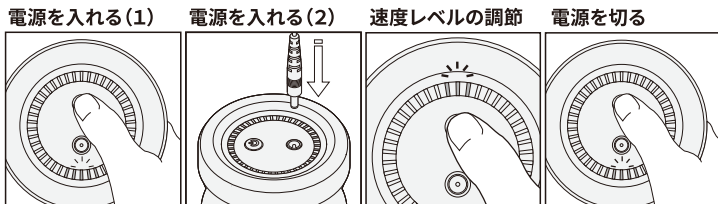

電源を入れる(1) 電源ボタンを約3秒間押し続けますと電源がオンになります。(電源がオンになると、充電ポート下部のLEDバンドが点灯し、Bluetooth®接続ライトが点滅します。)


電源を入れる(2) 本体を充電器の際にも電源が入ります。

速度レベルの調節 電源が付いた状態でもう一度電源ボタンを押すと振動を開始します。3段階の速度レベル変更が可能です。速度レベルによって電源ボタン上部のLEDランプが点灯していきます。4度目に振動が停止します。

電源を切る 電源ボタンを約3秒間押し続けますと、電源が切れます。ご使用後は必ず電源を切ってください。(充電中は電源を切ることができません。)

Bluetooth®接続方法

Hyperice Appと製品を接続して専門家の監修したルーチン動画を見ながら、製品を楽しむことができます。また、日々のアクティビティデータを組み合わせ、あなたの体のニーズに合った推奨プログラムを作成することもできます。

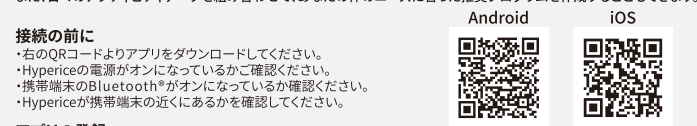


- 接続の前に**
- ・右のQRコードよりアプリをダウンロードしてください。
 - ・Hypericeの電源がオンになっているかご確認ください。
 - ・携帯端末のBluetooth®がオンになっているかご確認ください。
 - ・Hypericeが携帯端末の近くにあるか確認してください。
- アプリの登録**
- Hypericeアプリのをひらき、ウィンドウの指示に沿ってアカウント作成、プロフィール作成、製品登録を進めます。
- ・Create an account: メールアドレス、パスワード登録します。
 - ・Build your profile: 氏名を登録します。・About you: 誕生日、性別、身長、体重を登録します。
 - ・Select the devices you already own: お手持ちの製品を登録します。
 - ・Select your frequent activities: よく行うスポーツや行動を登録します。
 - ・Get custom recommendations: 日々のアクティビティデータを記録するアプリサービスとの連携が可能です。

- アプリの使い方**
- ・Home画面に、登録した製品が表示されているので、製品をタップします。
 - ・Routines画面でお好みのルーチンを選択し、次の画面で[Get started]ボタンを押します。
 - ・Bluetooth®接続画面になります。Hypericeの電源と携帯端末のBluetooth®がオンになっているれば自動で接続されます。お使いの製品が表示されたら製品をタップしてください。
 - ・5秒の準備時間の後に、動画のルーチンに応じて製品が動き出します。製品の操作は携帯端末で可能です。

※2022年5月現在、アプリの提供言語は、英語版のみです。日本語版リリースにはしばらくお待ちください。
 ※上記のアプリの登録方法、使い方は2022年5月現在のものです。アプリは予告なくアップデートされることがあり、登録方法、使い方が更新されることがあります。

付属品

日本国内で使用は、typeAのプラグを取り付けてご使用ください。

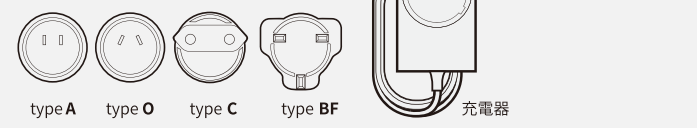

保証書

		持込修理	
品番	31020-008-00	お買上げ日	年 月 日
		保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	ご住所 干		
	電話番号 () -		
	お名前		様
販売店			JAN 4 544446 400193

本書はお買上げ日から上記の期間中に故障が発生した場合、アフターサービスに記載の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。

- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、修理等の本製品に関わる業務においてのみ利用させていただきます。また、修理業務のために製造メーカーに提供する場合があります。
- 保証書と購入証明書(レシート・納品書)がない場合は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 材料及び製造技術の欠陥以外の原因、取扱上の不注意、改造、不正修理等によって発生した不良におかれましては保証期間内であっても保証の対象とはなりません。
- 日本正規品以外(並行輸入品・模造品)は保証・不具合のサポート対象外となります。
- 修理・故障の際は、お買上げの販売店にご相談ください。修理は持込修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。 ■操作方法・組立方法・その他のお問合せはお買上げの販売店又はお客様ご相談センターにご相談ください。
- 消耗品は保証期間内であっても有償となります。詳しくはお客様ご相談センターへご相談ください。

長年ご愛用の製品の点検を

愛情点検

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱い
- 本体に変形がある、または異常に熱くなる
- コードに傷がある、またはコードを動かすと通電したりしなかったりする
- 使用中に異常な音がる
- 本体や部品にひび割れがある

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はお客様ご相談センターに点検をご相談ください。

[地球の環境保護の為、廃棄する時はそのまま放置せず、各自自治体の取り決めに従ってください]

お客様ご相談センター

受付時間: 10:00 ~ 12:00
13:00 ~ 16:00

0120-980-997 月~金曜日 (祝日・年末年始・夏季休業を除く)

発売元:株式会社ツインズ
〒273-0853
千葉県船橋市金杉7-1-9ツインヒルズ西館3F
TEL:047-449-8380 FAX:047-449-8381
URL <http://www.twins-corp.com/>