

# Venom 2 Back

## 使い方マニュアル



製品を安全にお使いいただくために、  
使い方マニュアルと裏面の取扱上の注意事項を必ずお読みいただき、  
使い方マニュアルは大切に保管ください。


保証書付

Ver:1.0

### 各部の名称と機能


#### ●コンプレッションスリーブ

- 1 フィットバンド1(フリーサイズ)
- 2 フィットバンド2(フリーサイズ)
- 3 Venom 2 ポッド
- 4 温熱パッド

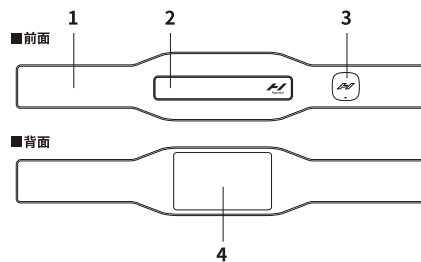

#### ●Venom 2 ポッド


- A 温熱レベルボタン
- B 電源ボタン (ON/OFF)
- C 振動パターンボタン
- D 振動パターンインジケータ
- E 充電残量インジケータ
- F 温熱レベルインジケータ
- G Bluetooth® インジケータ
- H 充電ポート

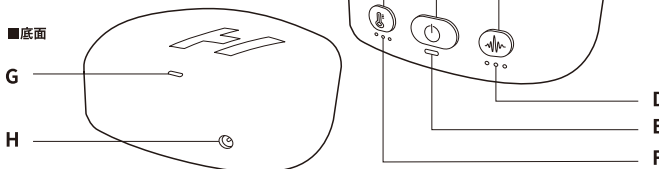

### 充電方法

充電器を、製品本体の充電ポート差し込み充電します。


#### 充電残量インジケータについて

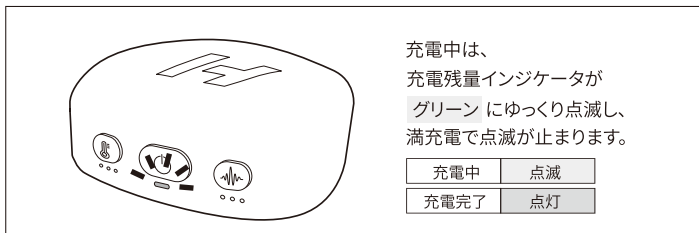

- ※ バッテリー寿命を長くさせるには充電が完全になる前に再充電することを推奨します。
- ※ 連続での使用可能時間は、温熱レベル/振動パターンにより時間が異なります。温熱レベル3では最長約2時間、それ以下のレベルではより長く使用できます。  
(1回のセッションは、通常はタイマー機能により15分、アプリと連携した場合は最長30分で自動停止されますが、必要に応じて再スタートしていただけれます。)
- ※ 1時間以上の連続使用はお控えください。
- ※ 1時間以上の使用時は本体を30分以上休ませてください。
- ※ 使用されない期間が続く場合にも毎月1回程度、定期的に充電されることを推奨します。
- ※ 不在時や一晩中の充電はしないでください。
- ※ 必ず付属のVenom 2専用の充電器で充電してください。本体の故障や火災の原因となります。
- ※ バッテリーの取り外しはできません。

### 付属品

日本国内でご使用は type A を取り付けてご使用ください。

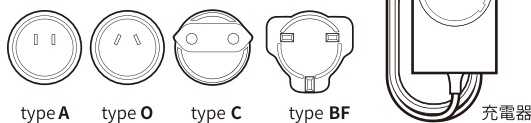

### ご使用方法

**⚠️ 注意**

**ご使用前にご確認ください**

使用環境や状況によってはコントロール設定とは関係なくやけどする可能性があります。  
器具が当たっている箇所の皮膚を頻繁にチェックし、不快感や発赤が見られた場合、直ちに離し、電源を切ってください。  
万一皮膚に異常を感じた場合は医師の診察を受けてください。

- 充電後は必ず、充電器を抜いてください。
- 充電中は電源が入りません。
- 製品の向きを間違えないようにご確認ください。
- Venom2ポッドは、製品を装着してからご操作ください。

**1**

**製品を装着する**

温熱パッドを背中に当て、調度よい位置になるよう調整します。  
フィットバンド1を好みの圧で固定し、その上へフィットバンド2を固定します。

**2**

**電源を入れる**

電源ボタンを約1秒間押し続けると電源がオンになります。  
(電源がオンになると、充電残量インジケータやVenom 2ポッドの中央のロゴが点灯します。)

**3**

**温熱レベルを調節する**

温熱レベルボタンを押すと3段階の温熱レベルに変更ができます。  
温熱レベルに応じて温熱レベルインジケータが点灯していきます。  
4度目に温熱が停止します。

**4**

**振動パターンを調節する**

振動パターンボタンを押すと3種の振動パターンに変更ができます。  
振動パターンに応じて振動パターンインジケータが点灯していきます。  
4度目に振動が停止します。

**5**

**電源を切る**

電源ボタンを約1秒間押し続けると、電源がオフになります。  
本体が充電されている場合や、一定時間続けて使用された場合は自動的に電源がオフになります。  
(通常約15分で自動停止されますが、アプリ連携により可動時間は3~30分に変更が可能です。)

**⚠️ 注意**

素肌で使用できるのはレベル1のみです。  
また、清潔で乾いた肌にお使いください。

### Bluetooth®接続方法

Hyperice App と製品を接続して専門家の監修したルーチン動画を見ながら、製品を楽しむことができます。  
また、日々のアクティビティデータを組み合わせて、あなたの体のニーズに合った推奨プログラムを作成することもできます。



#### 接続の前に

- ・右のQRコードよりアプリをダウンロードしてください。
- ・Hypericeの電源がオンになっているかご確認ください。
- ・携帯端末のBluetooth®がオンになっているかご確認ください。
- ・Hypericeが携帯端末の近くにあるかを確認してください。

※ 現在、アプリの提供言語は、英語版のみです。  
日本語版リリースにはしばらくお待ちください。  
※ 上記のアプリの登録方法、使い方は予告なくアップデートされることがあり、登録方法、使い方が更新されることがあります。

#### アプリの登録

- ・Hypericeアプリのをひらき、ウィンドウの指示に沿ってアカウント作成、プロフィール作成、製品登録を進めます。
- ・Create an account : メールアドレス、パスワード登録します。
- ・Build your profile : 氏名を登録します。
- ・About you : 誕生日、性別、身長、体重を登録します。
- ・Select hte devices you already own : お手持ちの製品を登録します。
- ・Select your frequent activities : よく行うスポーツや行動を登録します。
- ・Get custom recommendations : 日々のアクティビティデータを記録するアプリサービスとの連携が可能です。

#### アプリの使い方

- ・Home画面に、登録した製品が表示されているので、製品をタップします。
- ・Remote画面の製品を選択します。Bluetooth®接続画面になります。
- ・ご使用製品の電源と携帯端末のBluetooth®がオンになっていれば自動で接続されます。お使いの製品が表示されたら製品をタップしContinueを選択してください。アプリ内でセッション可能な画面になります。
- ・自分の好みのセッションに選択してお楽しみ頂けます。
- ・以下の機能がアプリ内で操作可能になります。
  - ・温熱レベルの操作(3段階)
  - ・振動パターンの操作(3パターン)
  - ・タイマーの操作(1回の可動時間を3分~30分まで1分単位で選択できます。)
  - ・セッションの開始/停止



感電、火災、人身傷害、または物的損害のリスクを減らすために、本器具は次の警告、注意、および「安全におつかいいいただくために」に従って使用する必要があります。

# 安全にお使いいただくために (重要)な注意事項

本器具をご使用いただく前に必ずお読みください。

## 危険

感電のリスクを減らすために

- 使用後および清掃前に、必ず本器具のプラグをコンセントから抜いてください。
- 水中に落ちてしまった器具には手を伸ばさないでください。すぐにコンセントからプラグを抜いてください。
- 入浴中やシャワー中に使用しないでください。
- 落下したり、バスタブやシンクに引き込まれたりする可能性のある場所に、器具を置いたり保管しないで下さい。水や他の液体に入れたり落としたりしないでください。
- 濡らさないでください。濡れたり湿ったりした状態では操作しないでください。

## 警告

やけど、火災、感電、および人身事故のリスクを減らすために

本器具は当マニュアルに記載された意図のためだけの用途に使用してください。これはおもちゃではありません。成人用です。けがをした箇所使用しないでください。器具のプラグをコンセントに差し込んだまま放置しないでください。充電直後、使用前、清掃前、およびパーツの取り付け / 取り外し前はプラグをコンセントから抜いてください。  
毛布や枕の下等、熱のこもる環境で動作さ

## 充電/バッテリーの注意