


お手入れ方法

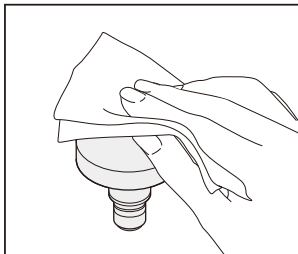

⚠️ お手入れの前にご確認ください

- 電源は必ずオフの状態で行ってください。
- 充電中に行わないでください。

- タオルまたは柔らかい布を使用して、機器から湿気を拭き取ります。
- 機器は、熱源、液体、お子様やペットなどから届かないところに置いてください。
- 直射日光の当たらない、涼しく乾燥した場所に保管してください。

Heated Head Attachment、すべての Hypervolt モデルと互換性があります。

- Hypervolt
- Hypervolt Plus
- Hypervolt Bluetooth®
- Hypervolt Plus Bluetooth®
- Hypervolt Go
- Hypervolt 2
- Hypervolt 2 Pro
- Hypervolt Go 2

Hypericeアプリのご紹介

Hyperice Appと製品を接続して専門家の監修したルーチン動画を見ながら、製品を楽しむことができます。

また、日々のアクティビティデータを組み合わせ、あなたの体のニーズに合った推奨プログラムを作成することもできます。

Android



iOS



※2023年9月現在、アプリの提供言語は、英語版のみです。日本語版リリースにはしばらくお待ちください。

⚠️ 安全にお使いいただくために

本機器を使用する前に、すべての安全に関する警告と指示をお読みください。

重要な安全指示

感電、火災、および人身傷害、物的損害のリスクを軽減するため、この機器は以下の警告、注意、および安全に関する指示に従って使用する必要があります。警告と指示に従わない場合、感電や火災、および/または重傷を負う原因となることがあります。

注意事項

●本機器は、当マニュアルに記載された意図のためだけの用途に使用してください。●本機器は、コンセントに接続したまま放置しないでください。●充電直後、使用前、清掃前に必ずコンセントからプラグを抜いてください。●使用しないとき、および部品を着脱する前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。●乾燥した場所でのみ使用可能です。屋外や濡れた面では使用せず、水や雨などにさらさないでください。●本機器は、その安全性について責任を負う人から機器の使用についての指示を受けるか監督されない限り、身体的、感覚的または精神的能力が低下している人(お子様を含む)や本機器の使用法について経験や知識が不足している人が使用することを想定していません。●機器は高温になる場合があります。熱に敏感な方は、使用時に注意が必要です。●お子様が本機器で遊ばないように監視してください。●当製品の稼働中や充電中は、絶対に放置しないでください。●機器を水に浸さないでください。お手入れは湿らせた布のみをお使いください。●当製品は、濡れた肌、あるいは外用軟膏(特に発熱成分を含むもの)には使用しないでください。やけどのおそれがあります。●分解しないでください。


警告

●加熱面の取り扱いにはご注意ください。重度のやけどを負うおそれがあります。●皮膚感度の低い箇所や血行不良の状態には使用しないでください。お子様や身体に不自由のある方が、付添いなしに使用するのは危険です。●コントロールの設定とは関係なく、やけどをするほどの高温になることがあります。乳幼児や病人、睡眠中や意識のない状態の人には使用しないでください。●皮膚感度の低い箇所や血行不良の人には使用しないでください。●水ぶくれを発生させるリスクを減らすために、機器の加熱部分に接触している皮膚は頻繁にチェックしてください。●違和感を覚えたら直ちに身体から離し、電源を切ってください。●本機器には、交換不可能な電池が内蔵されています。バッテリーの寿命が来た場合は、機器を適切に廃棄してください。バッテリーは、電子機器の適切な処理施設またはリサイクル施設にて安全に処理する必要があります。●バッテリーを充電するための公称温度範囲は0°C-45°C(32°F-113°F)です。●過酷な条件下では、バッテリーから液体が噴出することがありますが、触らないようにしてください。誤って触った場合は、多量の水で洗い流してください。液体が目に入った場合は、医師の指示を受けてください。バッテリーから噴出した液体は、刺激や火傷の原因となることがあります。●この機器に使用されているバッテリーは、誤った取り扱いをすと、火災や火傷の原因となることがあります。バッテリーパックや機器を分解したり、火気や過度の温度下にさらしたりしないでください。火気または130°C(265°F)以上の高温にさらされると、爆発のおそれがあります。●バッテリーの破裂、大漏洩、爆発があった場合、その場から退避し、汚染された場所を隔離してください。換気を良くして、煙、ガス、刺激臭を除去してください。●目 - 十分な水で15分間目を洗い流します。直ちに医師の診察を受けてください。●皮膚 - 付着箇所を多量の水と石鹸で洗い流すか、15分間シャワーを浴びてください。●吸入した場合 - 新鮮な空気にさらし、必要に応じて人工呼吸を行います。必要に応じて医師の診察を受けてください。●飲み込んだ場合 - 直ちに医師または地域の毒物管理センターに相談してください。●使用済みバッテリーは速やかに廃棄してください。お子様の手の届かない所に保管してください。分解したり、火中に投げたりしないでください。●加熱したヘッドを同じ場所に長時間当てないようにしてください。長時間、加熱された表面に肌をさらすと、不快感ややけどの原因になるおそれがあります。

保証書


本書はお買上げ日から上記の期間中に故障が発生した場合、アフターサービスに記載の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。

持込修理

品番	40021-001-00	お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	ご住所 干				
	お名前			電話番号 ()	-
販売店				JAN	 4 544446 450495

- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、修理等の本製品に関わる業務においてのみ利用させていただきます。また、修理業務のために製造メーカーに提供する場合があります。
- 保証書と購入証明書(レシート・納品書)がない場合は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 材料及び製造技術の欠陥以外の原因、取扱上の不注意、改造、不正修理等によって発生した不良におかれましては保証期間内であっても保証の対象とはなりません。
- 日本正規品以外(並行輸入品・横造品)は保証・不具合のサポート対象外となります。
- 修理・故障の際は、お買上げの販売店にご相談ください。修理は持込修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。■操作方法・組立方法・その他のお問合せはお買上げの販売店又はお客様ご相談センターにご相談ください。
- 消耗品は保証期間内であっても有償となります。詳しくはお客様ご相談センターへご相談ください。

長年ご愛用の製品の点検を



ご心配な症状はありませんか

- 電源プラグ - コードが異常に熱い
- 本体に変形がある、または異常に熱くなる
- コードに傷がある、またはコードを動かさずと通電したりしなかったりする
- 使用中に異常な音がする
- 本体や部品にひび割れがある

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はお客様ご相談センターに点検をご相談ください。

【地球の環境保護の為、廃棄する時はそのまま放置せず、各自自治体の取り決めに従ってください】

お客様ご相談センター

0120-980-997

受付時間：10:00～12:00
13:00～16:00
月～金曜日
(祝日・年末年始・夏季休業を除く)

発売元:株式会社ツインズ

〒273-0853 千葉県船橋市金杉7-1-9ツインビルズ西館3F

TEL:047-449-8380 FAX:047-449-8381 URL <http://www.twins-corp.com/>

 Hyperice

製品を安全にお使いいただくために、
使い方マニュアルと別紙の取扱説明書を必ずお読みいただき、
使い方マニュアルは大切に保管ください。

保証書付


Ver:1.0

各部の名称と機能


仕様

- 1 電源(ON/OFF) / 温熱レベル調節ボタン
- 2 温熱レベルインジケータ
- 3 充電残量インジケータ
- 4 USB-C充電ポート

側面図 1

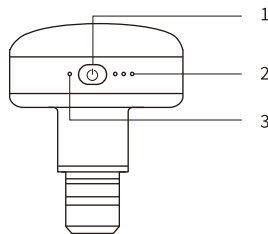


側面図 2

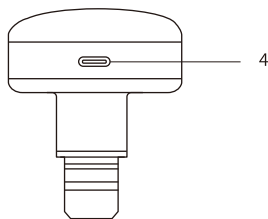


付属品

USB-Cケーブル

※USB電源アダプターは付属していません。

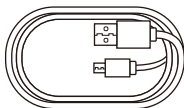

充電方法

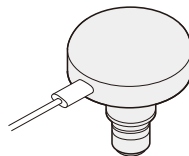


USB-Cケーブルを製品本体の充電ポートに差し込み充電します。

※付属のUSB-Cケーブルを、一般的なUSB電源アダプター(付属していません)に接続して充電してください。

満充電まではおおよそ最大3~3.5時間です。

充電残量インジケータについて

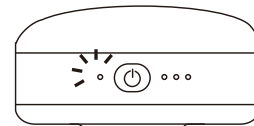

充電中は

グリーン のLEDライトが
ゆっくり点滅し
満充電で点滅が止まります。

充電中	点滅
充電完了	点灯

- ※ 充電の際はHeated Head AttachmentをHypervoltから外して下さい。
- ※ 充電はいつでも可能ですが、バッテリー寿命を長くさせるには、充電残量が完全になくなる前に再充電することを推奨します。
- ※ レベル3の熱で約75分の連続使用が可能です。温熱レベルにより時間が異なります。
- ※ 1時間以上の連続使用はお控えください。1時間以上の使用時は本体を30分以上休ませてください。
- ※ 使用されない期間が続く場合にも毎月1回程度、定期的に充電されることを推奨します。
- ※ 不在時や一晩中の充電はしないでください。
- ※ 必ず付属のHeated Head Attachment専用のUSBケーブルで充電してください。
- ※ バッテリーの取り外しはできません。


内蔵バッテリーに関する情報

※本機器は、リチウムポリマー電池を搭載しています。機器の改造、修理などは試みしないでください。
※すべての充電の説明に従い、説明書に指定された範囲外でバッテリーパックや機器を充電しないでください。不適切な充電や、指定範囲外の温度での充電は、バッテリーを損傷し、火災の危険を高めることがあります。


ご使用方法

⚠ ご使用前にご確認ください

- 充電後は必ず、USBケーブルを抜いてください。
- 充電中は電源が入りません。

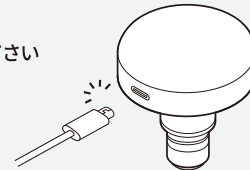

1

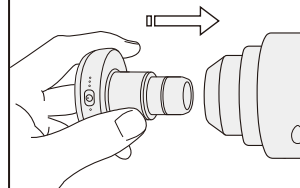


製品を取り付ける

Heated Head AttachmentをHypervoltにまっすぐ取り付けてください。


※アタッチメントが差し込めなくなるまでしっかり押し込んでください。

2

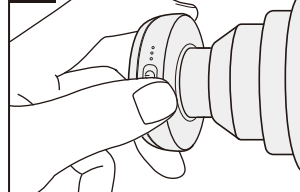


電源を入れる

電源ボタンを0.5秒長押しして起動させます。充電残量インジケータが点灯し、作動していることを示します。

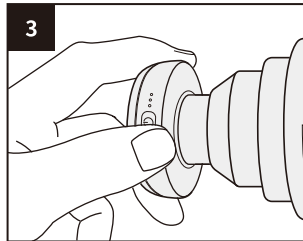

4

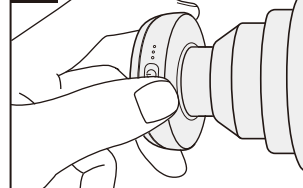

温熱レベルを調節する

電源ボタンを1回押すごとに、温熱レベルが1,2,3と切り替わります。


※温熱レベルはいつでも調節可能です。

- Level 1 - 109°F (43°C)
- Level 2 - 115°F (46°C)
- Level 3 - 120°F (49°C)

電源を切る

電源を切るには、電源ボタンを0.5秒長押しします。

※操作がなければ、15分後に電源は自動的に切れます。

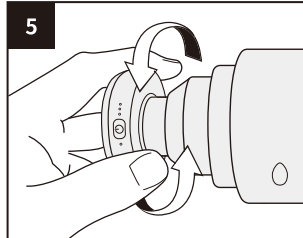

製品を取り外す

アタッチメントを少しねじりながら取り外してください。