


各部の名称と機能

- 1 速度インジケータ
- 2 圧力センサーインジケータ
- 3 Bluetooth接続インジケータ
- 4 排気口 ※排気口は常に空気が通るようにお使いください。
- 5 速度コントロールダイヤル
- 6 ハンドル/充電式リチウムイオン電池
- 7 LEDバンド(充電残量インジケータ)
- 8 電源/充電ポート
- 9 交換可能なヘッドアタッチメント
- 10 取り外し式バッテリーリリースボタン

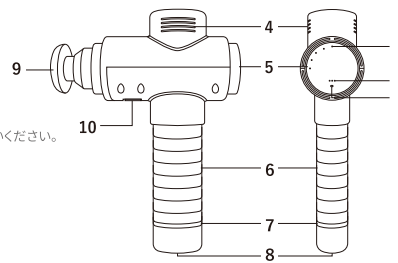

アタッチメント

Cushion (柔)	Ball (中)	Flat (硬)	Bullet (硬)	Fork (硬)
最も柔らかい素材で、表面積も大きくデリケートな箇所に適しています。	クッションアタッチメントより硬さが一段UP。大腿四頭筋や胸筋のような大きい筋肉群で活躍。	表面積が広く、ハムストリングスや大臀筋のような広範囲の筋肉群を手軽にカバーするのに最適。	表面積が小さく、強い圧力でピンポイントにサポート。肩甲骨の下や足裏・手のひら等の小さな箇所に。	2点を同時に刺激したい時に。脊柱起立筋や前腕、ふくらはぎ等、細長い筋肉に。

充電方法

充電器のプラグを製品本体の充電ポートに差し込み充電します。(電源を切って充電してください)

※バッテリー寿命を長くさせるには充電が完全になる前(LEDバンドがイエロー/オレンジ)に再充電することを推奨します。

※連続稼働可能時間は約3時間となりますが、振動レベルにより時間が異なります。

※1時間以上の連続使用はお控えください。

※1時間以上の使用時は本体を30分以上休ませてください。

※使用されない期間が続く場合にも毎月1回程度、定期的に充電されることを推奨します。

※不在時や一晩中の充電はしないでください。

※必ず付属のHypervolt 2 pro専用の充電器で充電してください。本体の故障や火災の原因となります。

※ご使用前に充電完了になるまで充電してください。

※充電後は必ず、充電器を抜いてからご使用ください。

LEDバンドについて

充電量に応じて

レッド → オレンジ
→ イエロー → グリーン
と順に変化します。

充電中	点滅
充電完了	点灯

注意

- ※身体のケア以外の目的で使用しないでください。
- ※次の部位には使用しないでください。頭部/顔/耳/首の前方/怪我をしている部位/手術をした部位/皮膚の下に金属、樹脂等を埋め込んでいる部位/皮膚トラブルのある部位/痛覚、知覚障害を起している部位/骨部位/関節部位/陰部 ※首の周辺に使用ときは特に注意し、首の前方には使用しないでください。
- ※アクセサリなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しないでください。
- ※製品の稼働時、アタッチメント部や製品の可動部に指などにむやみに振れないでください。

ご使用方法

 電源を入れる	 振動レベルの調節	 振動を止める→電源を切る
ハンドル裏にある電源スイッチを、左(緑が見えるまで)へ切り替えますと電源がオンになります。電源がオンになると、ハンドルのLEDバンドが点灯し、Bluetooth®接続ライトが点滅します。	速度コントロールダイヤルを時計回りに回して速度を上げてゆき、希望の速度に設定します。最低速度は9時の位置で最高速度は12時の位置です。	振動の止め方:速度インジケータが消灯するまで速度コントロールダイヤルを反時計回りに回します。電源の切り方:ハンドル裏にある電源スイッチを右(赤が見えるまで)へ切り替えてください。

 アタッチメントの取り付け	 アタッチメントの取り外し	 Forkアタッチメントの装着
アタッチメントをまっすぐ取り付けてください。アタッチメントが差し込めなくなるまでしっかり押し込みます。	アタッチメントを少しねじりながら取り外してください。	Forkのアタッチメントを装着する際にはFork側と本体の凸凹が合うように挿入してください。無理に挿入するとゴムの破損の原因となります。

Hypervolt 2 Pro

使い方マニュアル



製品を安全にお使いいただくために、
使い方マニュアルと別紙の取扱説明書を必ずお読みいただき、
使い方マニュアルと取扱説明書は大切に保管ください。

保証書付

Ver:2.0

Bluetooth®接続方法

Hyperice Appと製品を接続して専門家の監修したルーチン動画を見ながら、製品を楽しむことができます。また、日々のアクティビティデータを組み合わせ、あなたの体のニーズに合った推奨プログラムを作成することもできます。

Android	iOS

接続の前に

- ・右のQRコードよりアプリをダウンロードしてください。
- ・Hypericeの電源がオンになっているかご確認ください。
- ・携帯端末のBluetooth®がオンになっているかご確認ください。
- ・Hypericeが携帯端末の近くにあるかを確認してください。

アプリの登録

- Hypericeアプリのをひらき、ウィンドウの指示に沿ってアカウント作成、プロフィール作成、製品登録を進めます。
- ・Create an account : メールアドレス、パスワード登録します。
 - ・Build your profile : 氏名を登録します。・About you : 誕生日、性別、身長、体重を登録します。
 - ・Select hte devices you already own : お手持ちの製品を登録します。
 - ・Select your frequent activities: よく行うスポーツや行動を登録します。
 - ・Get custom recomendations: 日々のアクティビティデータを記録するアプリサービスとの連携が可能です。

アプリの使い方

- ・Home画面に、登録した製品が表示されているので、製品をタップします。
 - ・Routines画面でお好みのルーチンを選択し、次の画面で[Get started]ボタンを押します。
 - ・Bluetooth®接続画面になります。Hypericeの電源と携帯端末のBluetooth®がオンになっていれば自動で接続されます。お使いの製品が表示されたら製品をタップしてください。
 - ・5秒の準備時間の後に、動画のルーチンに応じて製品が動き出します。製品の操作は携帯端末で可能です。
- ※2022年6月現在、アプリの提供言語は、英語版のみです。日本語版リリースにはしばらくお待ちください。
- ※上記のアプリの登録方法、使い方は2022年6月現在のものです。アプリは予告なくアップデートされることがあり、登録方法、使い方が更新されることがあります。

付属品

日本国内でのご使用は、typeAのプラグを取り付けてご使用ください。

type A	type O	type C	type BF	充電器	収納ポート

保証書

		持込修理	
品番	54200-008-00	お買上げ日	年 月 日
		保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	ご住所 〒		
	電話番号 ()		-
お名前		様	
販売店	JAN		
	4 544446 400025		

- 本書はお買上げ日から上記の期間中に故障が発生した場合、アフターサービスに記載の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。
- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、修理等の本製品に関わる業務においてのみ利用させていただきます。また、修理業務のために製造メーカーに提供する場合があります。
 - 保証書と購入証明書(レシート・納品書)がない場合は保証期間内であっても保証対象外となります。
 - 材料及び製造技術の欠陥以外の原因、取扱上の不注意、改造、不正修理等によって発生した不良におかれましては保証期間内であっても保証の対象とはなりません。
 - 日本正規品以外(並行輸入品・模造品)は保証・不具合のサポート対象外となります。
 - 修理・故障の際は、お買上げの販売店にご相談ください。修理は持込修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。 ■操作方法・組立方法・その他のお問合せはお買上げの販売店又はお客様ご相談センターにご相談ください。
 - 消耗品は保証期間内であっても有償となります。詳しくはお客様ご相談センターへご相談ください。

 愛情点検	長年ご愛用の製品の点検を	<p>ご使用中 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はお客様ご相談センターに点検をご相談ください。</p>
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電源プラグ・コードが異常に熱い ■本体に変形がある、または異常に熱くなる ■コードに傷がある、またはコードを動かすと通電したりしなかったりする ■使用中に異常な音がる ■本体や部品にひび割れがある 	

【地球の環境保護の為、廃棄する時はそのまま放置せず、各自治体の取り決めに従ってください。】

お客様ご相談センター	受付時間: 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00	発売元:株式会社ツインズ 〒273-0853 千葉県船橋市金杉1-7-9ツインヒルズ西館3F TEL:047-449-8380 FAX:047-449-8381 URL http://www.twins-corp.com/
	0120-980-997 月~金曜日 (祝日・年末年始・夏季休業を除く)	