

HYPERFLUX


使い方マニュアル

各部の名称と機能


仕様

- 1 電源ON/OFFボタン
- 2 時間調整ボタン
- 3 圧力調整ボタン
- 4 開始/一時停止ボタン
- 5 電源ポート
- 6 エア出口
- 7 ジャンクションボックス
- 8 ブロックプラグ
- 9 コネクタ


コントロールユニット

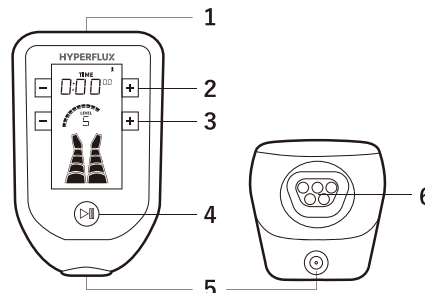

ホース

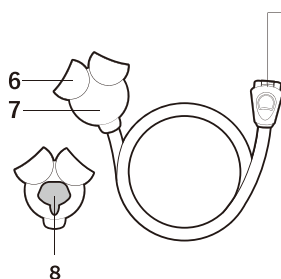

レッグアタッチメント

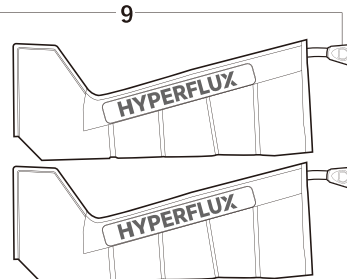


付属品

日本国内でご使用は、typeAのプラグを取り付けてご使用ください。




type A

type C

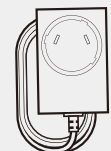

ブロックプラグ

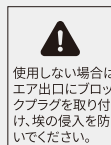


使用しない場合はエア出口にブロックプラグを取り付け、埃の侵入を防いでください。

コントロールユニットのスクリーン表示

仕様

- A 充電残量インジケータ
- B 休憩時間インジケータ
- C セッション時間インジケータ
- D 加圧レベルインジケータ
- E 加圧ゾーンインジケータ

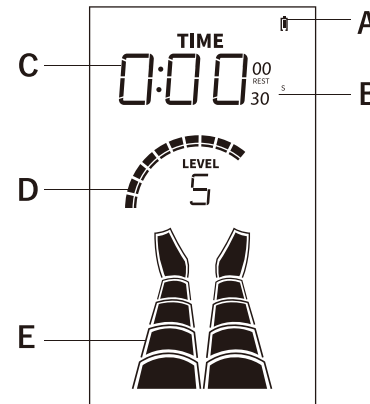


製品を安全にお使いいただくために、
使い方マニュアルと別紙の取扱説明書を必ずお読みいただき、
使い方マニュアルと取扱説明書は大切に保管ください。

保証書付

Ver:1.0

充電方法

充電は付属のHyperflux専用の充電器で
コントロールユニットをコンセントにつないでください。

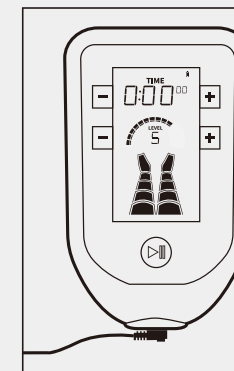

充電残量インジケータについて

充電中	メモリ点滅
充電完了	全体点滅

このコントロールユニットには充電式リチウムイオン電池が装備されています。電源バッテリーを完全に充電するには約6時間で満充電になります。

注意 充電中の製品のご使用はお控えください。製品の劣化に繋がります。

- ※ バッテリー寿命を長くさせるには充電が完全になくなる前に再充電されることをおすすめします。
- ※ 使用されない期間が続く場合にも毎月1回程度、定期的に充電されることを推奨します。
- ※ 不在時や一晩中の充電はしないでください。
- ※ 必ず付属のhyperflux専用の充電器で充電してください。本体の故障や火災の原因となります。

保証書

持込修理

品番	63000-001-00	お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	ご住所 〒				様
	電話番号 () -				
販売店	お名前				JAN 4 544446 400483

本書はお買上げ日から上記の期間中に故障が発生した場合、アフターサービスに記載の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。

- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、修理等の本製品に関わる業務においてのみ利用させていただきます。また、修理業務のために製造メーカーに提供する場合があります。
- 保証書と購入証明書(レシート・納品書)がない場合は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 材料及び製造技術の欠陥以外の原因、取扱上の不注意、改造、不正修理等によって発生した不良におかれましては保証期間内であっても保証の対象とはなりません。
- 日本正規品以外(並行輸入品・模造品)は保証・不具合のサポート対象外となります。
- 修理・故障の際は、お買上げの販売店にご相談ください。修理は持込修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。■ 操作方法・組立方法・その他のお問合せはお買上げの販売店又はお客様ご相談センターにご相談ください。
- 消耗品は保証期間内であっても有償となります。詳しくはお客様ご相談センターへご相談ください。

長年ご愛用の製品の点検を

愛情点検

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱い
- 本体に変形がある、または異常に熱くなる
- コードに傷がある、またはコードを動かすと通電したりしなかったりする
- 使用中に異常な音がある
- 本体や部品にひび割れがある

ご使用中止


電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はお客様ご相談センターに点検をご相談ください。

[地球の環境保護の為、廃棄する時はそのまま放置せず、各自自治体の取り決めに従ってください]

<p>お客様ご相談センター</p> <p>0120-980-997</p> <p>受付時間：10:00～12:00 13:00～16:00 月～金曜日 (祝日・年末年始・夏季休業を除く)</p>	<p>発売元:株式会社ツインズ</p> <p>〒273-0853 千葉県船橋市金杉7-1-9ツインヒルズ西館3F TEL:047-449-8380 FAX:047-449-8381 URL http://www.twins-corp.com/</p>
--	--


ご使用方法

装着方法

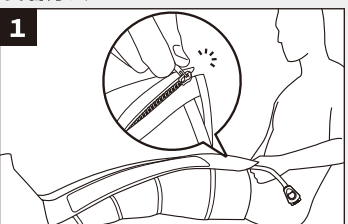


初めにリラックスできる姿勢をとり、レッグアタッチメントに足を片足ずつ入れます。付け根部分に合わせて、ファスナーは最後まであげてください。

コネクタを接続する

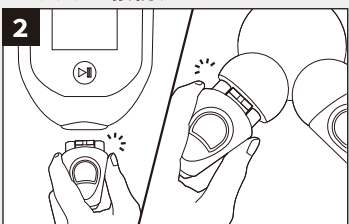


コントロールユニットのエア出口にホースのコネクタを接続してください。また、ジャンクションボックスにレッグアタッチメントのコネクタを接続してください。コネクタは、カチッとなるまで差し込んでください。

電源を入れる

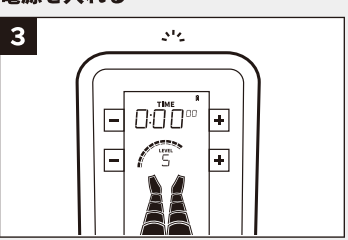


装着できたら、コントロールユニット上部にある電源ボタンを強めに押し、電源を入れます。

開始する

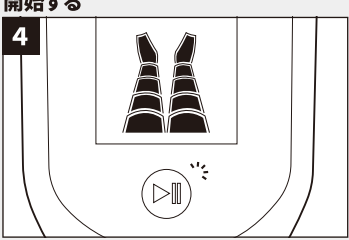


開始/一時停止ボタンをタップすると、セッションを開始します。セッション中に、開始/一時停止ボタンをタップすればいつでも停止できます。

セッションの終了を確認する

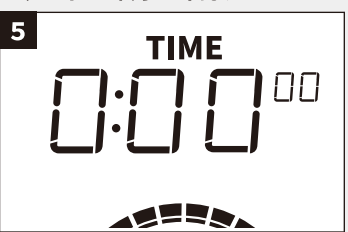

セッション時間インジケータに 0:00:00 と表示されても、サイクルが一巡するまで動き続けます。

コネクタを外す

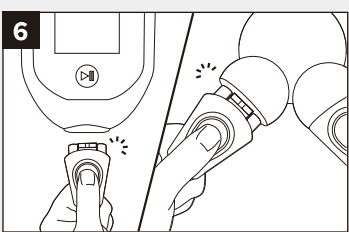


コントロールユニット、ジャンクションボックスから、コネクタ上部のボタンを押しながら引き抜きます。

安全にお使いいただくために(重要)な注意事項

- 使用中にひどい痛みや気分が悪くなった場合や緊急時にレッグアタッチメントを取り外したい場合は次の手順を実行します。
- 電源ボタンを押して、コントロールユニットを停止します。
- コントロールユニットまたはレッグアタッチメントからホースを外します。
- 膝部からレッグアタッチメントを取り外します。
- 必要に応じて、有資格の医療従事者に速やかに相談してください。

コントロールユニット操作方法

セッション時間の調整

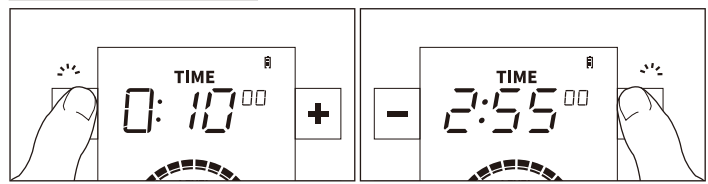


セッション時間インジケータの左右にある+、- ボタンを押して調整できます。一度押して5分、長押しで増減のスピードを速めることができます。セッションの実行中であっても、調整は可能です。

2時間55分を超える時間を設定すると、**[連続モード]に切り替わります。**

[CONTINUOUS] と表示され、タイマーではなく経過時間が開始されます。

[連続モード]をオフにするには- を押し、時間を短くします。

加圧レベルの調整

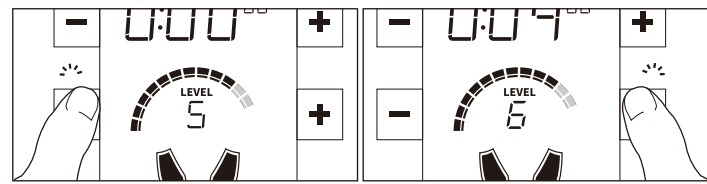

加圧レベルインジケータの左右にある+、- ボタンを押して調整します。加圧レベルは、1~最大7まで。セッション中に加圧レベルを調整すると、10秒間停止した後、新しい圧力でサイクルを再開します。

加圧パターンは2種類あり、切り替えができます。

加圧パターンを切り替えるには、圧力レベルを7にした状態で、+ ボタンを約5秒間長押しします。

Pulse モード

足元から軽めの圧迫が始まります。選択部位の全体が圧迫されると、人の手のもみほくしのように、部分的に圧迫と解放を繰り返します。

SEQUENTIALモード

足元から加圧し、順次加圧エリアが上へ移動しながら増えていきます。

休憩時間の調整

休憩時間とは

セッションが一巡した後、次のサイクルを開始するまでの休憩時間のことです。

REST 30"~90"

編集モードに切り替える

編集モードへ切り替えるには、セッション時間を10分にした状態で、+ ボタンを約4秒間長押しします。

加圧ゾーンの調整


加圧ゾーンとは

加圧する部位を足先~ももまでの5段階に分けて指定することができます。

編集モードに切り替える


編集モードへ切り替えるには、圧力レベルを1にした状態で、+ ボタンを約5秒間長押しします。

休憩時間を調整する

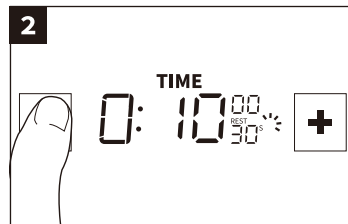


編集モードに入ると、休憩時間が画面右側に赤色で表示され、点滅します。時間調節ボタンの+ - を押すと、休憩時間を15秒から90秒の間で設定できます。(15秒単位で調整できます。)

決定する

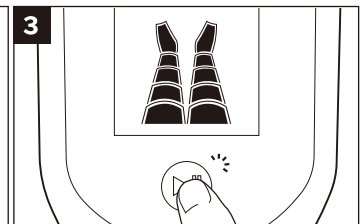


お好きな休憩時間を設定し、コントロールユニットの開始/一時停止ボタンを押します。休憩時間が消えると設定完了です。

加圧ゾーンを選択する

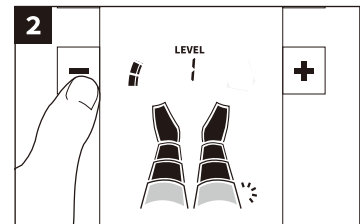

編集モードに入ると加圧ゾーンインジケータが点滅しはじめます。加圧レベルインジケータの左右にある+、- ボタンを押して調整します。

決定する

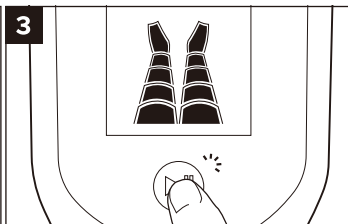

お好きな加圧ゾーンを選択し、開始/一時停止ボタンを押します。加圧ゾーンインジケータの点滅が消えると設定完了です。