

HYPERFLUX

Arm Attachments

使い方マニュアル

当製品はHyperfluxのアタッチメント製品です。
Hyperfluxに付属する専用のコントロールユニット・ホース(別売り)が必要です。



製品を安全にお使いいただくために、
使い方マニュアルと別紙の取扱説明書を必ずお読みください。

こちらは印刷用です。

保証書を使用する場合A4サイズ用の紙にご印刷ください。

保証書付


Ver:1.0

各部の名称と機能

仕様

- 1 コネクタ
- 2 バックル

Right arm (右腕用)

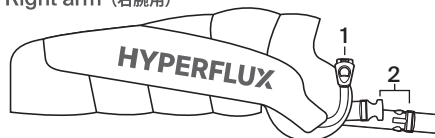


Left arm (左腕用)



ご使用方法 ※イラストはLeft arm Attachment (左腕用)です。


装着する

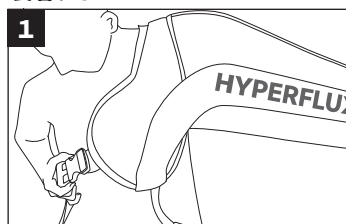

リラックスできる姿勢をとり、アームアタッチメントを腕に装着します。

バックルをわきの下に通し固定してください。
※ 右腕用・左腕用を間違えないようご注意ください。
(Hyperfluxという文字が前方向になります。)


コネクタを接続する

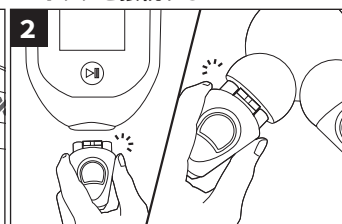

コントロールユニットのエア出口にホースのコネクタを接続してください。また、ジャンクションボックスにレッグアタッチメントのコネクタを接続してください。

コネクタは、カチッとなるまで差し込んでください。

コントロールユニットの使い方・注意事項はHyperfluxの使い方マニュアルをご参照ください。

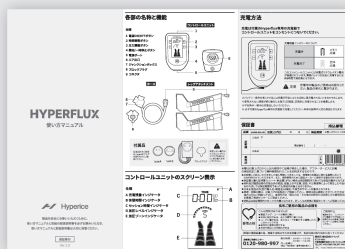

安全にお使いいただくために(重要)な注意事項

使用中にひどい痛みや気分が悪くなった場合や緊急時にアームアタッチメントを取り外したい場合は次の手順を実行します。

- ・電源ボタンを押して、コントロールユニットを停止します。
- ・コントロールユニットまたはレッグアタッチメントからホースを外します。
- ・肘部からレッグアタッチメントを取り外します。
- ・必要に応じて、有資格の医療従事者に速やかに相談してください。

保証書

持込修理

お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	ご住所 〒		
	電話番号 () -		
販売店	お名前		様
			82070-001-00 4 544446 450358

本書はお買上げ日から上記の期間中に故障が発生した場合、アフターサービスに記載の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。

- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、修理等の本製品に関する業務においてのみ利用させていただきます。また、修理業務のために製造メーカーに提供する場合があります。
- 保証書と購入証明書(レシート・納品書)がない場合は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 材料及び製造技術の欠陥以外の原因、取扱上の不注意、改造、不正修理等によって発生した不良におかれましては保証期間内であっても保証の対象とはなりません。
- 日本正規品以外(並行輸入品・模造品)は保証・不具合のサポート対象外となります。
- 修理・故障の際は、お買上げの販売店にご相談ください。修理は持込修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。■ 操作方法・組立方法・その他のお問合せはお買上げの販売店又は、お客様ご相談センターにご相談ください。
- 消耗品は保証期間内であっても有償となります。詳しくはお客様ご相談センターへご相談ください。

長年ご愛用の製品の点検を



愛情点検

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱い
- 本体に変形がある、または異常に熱くなる
- コードに傷がある、またはコードを動かすと通電したりしなかったりする
- 使用中に異常な音がある
- 本体や部品にひび割れがある

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はお客様ご相談センターに点検をご相談ください。

【地球の環境保護の為、廃棄する時はそのまま放置せず、各自自治体の取り決めに従ってください】

お客様ご相談センター 受付時間: 10:00 ~ 12:00
0120-980-997 13:00 ~ 16:00
月~金曜日 (祝日・年末年始・夏季休業を除く)

発売元:株式会社ツインズ
〒273-0853
千葉県船橋市金杉7-1-9ツインヒルズ西館3F
TEL:047-449-8380 FAX:047-449-8381
URL: http://www.twins-corp.com/