


ご使用方法

6. ZoneBoost™機能を追加する


セッション中、特定のゾーンの強度を上げたい場合は、ZoneBoost™機能を使用します。

ディスプレイ上に強度を上げたいゾーンの番号が表示されるまで、ZoneBoost™ボタンを押します。

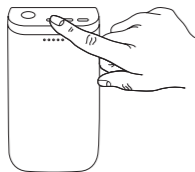

7. 使用を開始する

使用を開始するには、開始/停止ボタンを押します。使用を一時停止するには、開始/停止ボタンをもう一度押します。再度、開始/停止ボタンを押すと使用を再開できます。

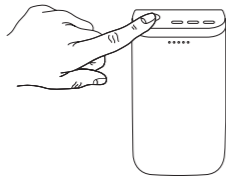

8. 使用を終了する

加圧時間が終了し、動作が止まったら5~10秒間そのままの状態を待ち、少しブーツから空気を抜いてからジッパーを下げます。

9. お手入れ


電源を切った状態で充電状態ではないことを確認の上、湿らせた清潔な布で本体を拭きとり清潔な乾いた布で十分に乾かします。

使用していないときは直射日光と高温多湿な場所を避けて保管してください。

HyperSync™テクノロジー

ペアリングを解除する

ペアリング済みのブーツのペアリングを解除する際には、スクリーンに「Unpaired!」と表示されてHyperSync™接続インジケータが消灯するまで、開始/停止ボタンを長押しします。

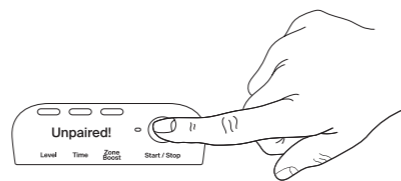


ペアリングを行う

両方のデバイスの電源を入れます。

ディスプレイに「Paired!」と表示されるまで、どちらかのコントロールユニットの開始/停止ボタンを押し続けます。

両方のデバイスが「Paired!」と表示され、HyperSync™接続インジケータが点灯するまで、もう一方のデバイスの開始/停止ボタンを押し続けます。

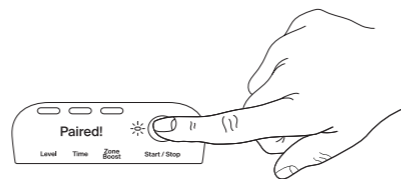

注意事項

安全にお使いいただくために

使用中にひどい痛みや気分が悪くなった場合や緊急時にレッグアタッチメントを取り外したい場合は次の手順を実行します。

- 電源ボタンを押して、コントロールユニットを停止します。
- 肢部からブーツを取り外します。
- 必要に応じて、有資格の医療従事者に速やかに相談してください。

 Hyperice

【販売元】アルコインターナショナル株式会社

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場3-5-8 オーク心斎橋ビル2F




hypericejp.com

Let's get started


Normatec Premier



各部の名称と機能

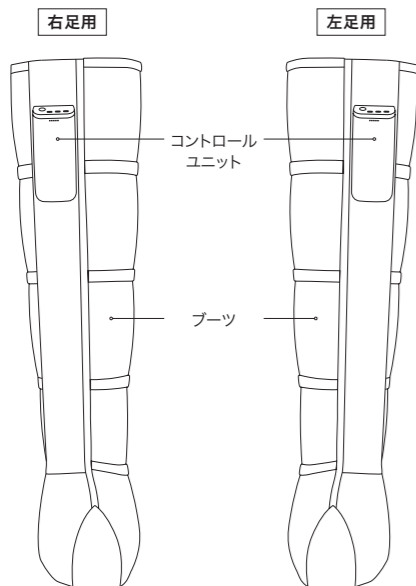


コントロールユニット

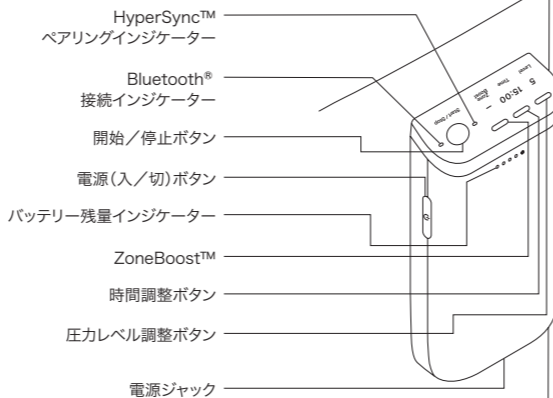

ご使用方法


1. 本体を充電する

付属の充電器で本体を充電してください。
5つのバッテリー残量インジケータがすべて
白く点灯したら満充電の合図です。

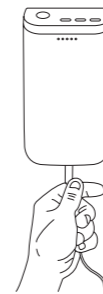


2. ブーツを足に装着する

アタッチメントは、素肌の上からでも服の上からでも装着可能です。
ポケットの中が空であること、衣類がかさばって使用中不快にならないかをご確認ください。座ったり、体を傾けたり、横になったりして楽な姿勢をとり、ブーツのジッパーを完全に閉めてください。
ジッパーの一部または全部を開けたまま使用しないでください。

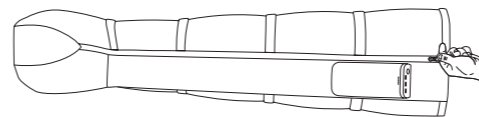


3. 電源を入れる

本体の電源(入/切)ボタンを、ディスプレイとバッテリー残量インジケータが点灯するまで1秒間ほど長押しして電源をつけます。

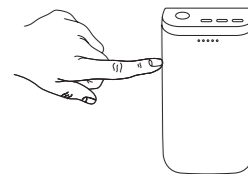

4. 圧力レベルを調整する

圧力調整ボタンを1回押すたびにレベルが1つ上がります。
ボタンに隣接するディスプレイ上の数字は、現在の圧力レベルを示します。
お好みの圧力レベルになるように調整します。

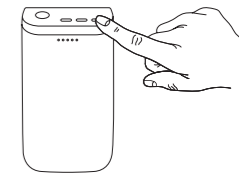

5. 加圧時間を調整する

時間調整ボタンを1回押すことに、加圧時間が15分追加されます。
ボタンに隣接するディスプレイ上の数字は、現在の設定時間を示します。
お好みの加圧時間になるように調整します。

